

# Gebrauchsanweisung

## **Starlight® Base**

HMV 99.17.01.0003

## **Starlight® Standard**

HMV 99.17.01.0005

## **Starlight® Secure**

HMV 99.17.01.0002

## **Starlight® Secure Leder**

HMV 99.17.01.0004

## **Starlight® Easy**

HMV 99.17.01.0008

## **Starlight® Protect**

HMV 99.17.01.0007

## **Starlight® Protect Plus**

HMV 99.17.01.0006

## **Starlight® Go Sport**

HMV 99.17.01.0011

## **Starlight® Go Sport Plus**

HMV 99.17.01.0010

## **Starlight® Snooze**

HMV 99.17.01.0012



Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für einen Kopfschutz von ATO FORM entschieden. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Kauf unseres Produktes danken. Sie haben ein Produkt erworben, das allen europäischen Sicherheitsanforderungen genügt.

Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle. Bei Fragen zu diesem Produkt und Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, da diese für die Sicherheit des Benutzers und als Leitfaden für den korrekten Gebrauch und die korrekte Pflege verfasst worden sind.

Achten Sie darauf, dass sich der Kopfschutz in einwandfreiem Zustand befindet, bevor Sie ihn benutzen.



**Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.**

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Thema</b>	<b>Seite</b>	<b>Thema</b>	<b>Seite</b>
Sicherheitshinweise .....	5	Modelle	
Sicherheits- und Tragehinweise .....	5	Starlight Protect und Protect Plus .....	15
Nutzungsdauer .....	6	Zubehör	
Verwendungszweck		Starlight Protect und Protect Plus .....	15
Starlight Base, Secure und Standard ...	7	Technische Daten	
Modelle und Zubehör		Starlight Protect und Protect Plus .....	16
Starlight Base, Secure und Standard ...	7	Verwendungszweck	
Technische Daten		Starlight Go Sport und Go Sport Plus ...	17
Starlight Base und Secure .....	8	Modelle	
Technische Daten		Starlight Go Sport und Go Sport Plus ...	18
Starlight Standard .....	9	Zubehör	
Verwendungszweck		Starlight Go Sport und Go Sport Plus ...	18
Starlight Secure Leder .....	10	Technische Daten	
Modell Starlight Secure Leder .....	10	Starlight Go Sport und Go Sport Plus ...	19
Zubehör Starlight Secure Leder .....	10	Verwendungszweck Starlight Snooze ...	20
Technische Daten		Modelle Starlight Snooze .....	20
Starlight Secure Leder .....	11	Zubehör Starlight Snooze .....	20
Verwendungszweck		Technische Daten Starlight Snooze .....	21
Starlight Easy .....	12	Reinigung und Pflege	
Modell Starlight Easy.....	12	von Kopfschutz Textil .....	22
Zubehör Starlight Easy .....	12	Reinigung und Pflege	
Technische Daten Starlight Easy .....	13	von Kopfschutz Leder .....	22
Verwendungszweck		Wiedereinsatz .....	22
Starlight Protect und Protect Plus .....	14		



### ■ *Sicherheitshinweise*

Die Kopfschutz-Serien sind mit dem CE-Zeichen versehen und entsprechen den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG. Sie wurden nach neuesten Erkenntnissen entwickelt. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.

### ■ *Sicherheits- und Tragehinweise*

Der Kopfschutz soll nur von einem einzigen Benutzer getragen werden!

Lassen Sie den Benutzer nie unbeaufsichtigt. Halten Sie den Kopfschutz immer außer Reichweite von Unbefugten!

Stellen Sie den Kopfschutz vor der Benutzung richtig ein!

Der Kopfschutz von ATO FORM ist mit einem verstellbaren Kinnriemen versehen. Stellen Sie die Riemen so ein, dass der Kopfschutz gut, aber nicht zu fest sitzt. Dies gilt auch für den Kinnschutz, der zusätzlich erhältlich ist. Bitte achten Sie darauf, dass die Riemen fest verschlossen sind!

Der Kopfschutz von ATO FORM darf nur für die dafür vorgesehene Indikation verwendet und nicht zweckentfremdet werden (z.B. als Fahrrad- oder Reithelm)!

Lagern Sie den Kopfschutz bei Nichtgebrauch immer griffbereit, vorzugsweise an derselben Stelle in der Nähe des Benutzers, so dass dieser schnell und richtig aufgesetzt werden kann.

## ■ *Nutzungsdauer*

Um eine optimale Schutzwirkung zu erreichen, ist das Produkt pfleglich und sorgsam zu behandeln. Es ist auf einen genauen Sitz zu achten!

Das Produkt ist bei Eintreffen eines oder mehrerer der nachfolgenden Kriterien zu ersetzen:

- Nicht mehr gegebene Passform, z. B. durch Wachstum, Veränderungen der Kopfform, usw.
- Außergewöhnliche Belastung des Kopfschutzes, Nutzungsgrad
- Tragehäufigkeit, Sturzhäufigkeit des Patienten
- Pflegegrad
- Hygienischer Zustand, beeinflusst z. B. durch Medikamente und Krankheitsbilder, des Kopfschutzes

**Verwenden Sie den Kopfschutz nur, wenn sich dieser in einwandfreiem Zustand befindet!**

**Wenden Sie sich bei Mängeln unverzüglich an Ihren Fachhändler!**

## Verwendungszweck

Die Kopfschutz-Modelle **Starlight Base, Secure und Standard** dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen, sie decken Fallgefährdungen **mit geringem bis mittlerem Verletzungspotential** ab, bei denen die Schutzwirkung über eine stoffüberzogene, stoßabsorbierende PE-Schaumpolsterung erfolgt.

Der Oberkopf ist durch Lamellen fast geschlossen. Der Kopfschutz ist durch ein Schnürband (Modell Secure) oder Klettverschluss (Modell Base) in der Größe verstellbar und bietet größten Schutz am Oberkopf.

Kinn-/Stirn- und Nackenschutz sind abhängig vom Modell als Zubehör bestellbar.

Andere Verschlusssysteme wie z.B. Fixlock oder Magnetverschluss optional sind gegen Aufpreis zu bestellen.

### **Indikationen:**

Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, autoaggressiven Patienten.

## Modelle Starlight Base, Secure und Standard

C 40200	<b>Starlight Base</b>
C 40110_B	<b>Starlight Secure</b> (Textil)
5180	<b>Starlight Standard</b>

## Zubehör für Starlight Base, Secure und Standard

C 4012B	<b>Kinnschutz</b> (Textil)
C 4013B	<b>Stirnschutz</b> für Base oder Secure (Textil)
C 4014B	<b>Nackenschutz</b> für Base oder Secure (Textil)

 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Produkt-Information.

■ *Technische Daten*

<b>Kopfschutz Starlight Base und Secure</b>	
Kopfumfang	47 – 62 cm, in 5 Intervallen
Farben	Blau, Bordeaux, Grün, Grau + Sonderfarben
Material	Textil
Konstruktion	1 cm starker stoßabsorbierender PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1 cm stark, 5 cm hoch
Verstärkter Stirnschutz/Nackenschutz	3 cm stark, 4 cm hoch (Zubehör)
Normaler Hinterkopfschutz	1 cm stark, 12 cm heruntergezogen
Ohrenschutz	entfällt
Oberseitenkonstruktion <b>Starlight Base</b>	4 Laschen, 1 cm starker stoßabsorbierender PE-Schaum, mit Baumwollstoff überzogen, mit Klett verbunden
Oberseitenkonstruktion <b>Starlight Secure</b>	7 Laschen, 0,5 cm starker stoßabsorbierender PE-Schaum, mit Baumwollstoff überzogen
Ausführung Oberseite geschlossen	entfällt
Kinnriemen	18 mm Textilriemen, mit Umlenkschnalle, Klett- und Flauschverschluss
Nackenriemen	entfällt
Kinnschutz	Schaumstoff, mit Baumwolle überzogen
Gewicht ohne Zubehör	120 – 160 g



## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Standard</b>	
Kopfumfang	47 – 65 cm, in 1 cm-Intervallen
Farben	Blau, Rot, Braun + Sonderfarben
Material	Textil, Innenfutter Baumwolljersey
Konstruktion	1,5 cm starker stoßabsorbierender PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1,5 cm stark, 10 cm hoch
Verstärkter Stirnschutz	entfällt
Hinterkopfschutz	1,5 cm stark, 10 cm hoch
Ohrenschutz	entfällt
Oberseitenkonstruktion	zum Kreuz vernähte Oberstreben, mit 1 cm starker Schaumstoffeinlage
Ausführung Oberseite geschlossen	geschlossene, textilüberzogene Kappe aus stoßabsorbierendem PE-Schaum
Kinnriemen	18 mm Textilriemen, mit 2 Umlenkschnallen
Nackenriemen	entfällt
Kinnschutz	Schaumstoff, mit Baumwolle überzogen
Gewicht ohne Zubehör	ab 95 g

## ■ *Verwendungszweck*

Der Kopfschutz **Starlight Secure Leder** dient dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen, er deckt Fallgefährdungen mit **mittlerem Verletzungspotential** ab.

Andere Verschlussysteme wie z.B. Fixlock oder Magnetverschluss optional sind gegen Aufpreis zu bestellen.

### **Indikationen:**

Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, sowie bei autoaggressiven Patienten.

Der Kopfschutz **Starlight Secure Leder** hat einen 1 cm starken Stirnschutz; als Zubehör erhalten Sie auch einen verstärkten Stirnschutz (3 cm stark).

## ■ *Modelle Starlight Secure Leder*

C 40110     **Starlight Secure** (mit Lederbezug)

## ■ *Zubehör für Starlight Secure Leder*

C 4012     **Kinnschutz** (aus Leder)  
C 4013     **Stirnschutz** (aus Leder)  
C 4014     **Nackenschutz** (aus Leder)



**Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Produkt-Information.**

## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Secure Leder</b>	
Kopfumfang	47 – 62 cm in 5 Intervallen
Farben	Beige + Sonderfarben
Material	Rindsleder schadstofffrei gegerbt, insbesondere frei an PCP, Azofarbstoffen, Formaldehyd und Chrom VI-Verbindungen
Konstruktion	aus lederüberzogenem 1 cm starkem stoßabsorbierendem PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1 cm stark, 5 cm hoch
Verstärkter Stirnschutz/Nackenschutz	3 cm stark, 4 cm hoch (Zubehör)
Normaler Hinterkopfschutz	1 cm stark, 12 cm heruntergezogen
Ohrenschutz	entfällt
Oberseitenkonstruktion	7 Laschen, 0,5 cm starker stoßabsorbierender PE-Schaum
Ausführung Oberseite geschlossen	entfällt
Kinnriemen	18 mm breite Lederriemen, mit Dornschießen individuell einstellbar
Nackenriemen	entfällt
Kinnschutz	lederüberzogener stoßabsorbierender PE-Schaum
Gewicht ohne Zubehör	175 – 255 g

## ■ Verwendungszweck

Der Kopfschutz **Starlight Easy** ist ein besonders leichter Protektor für hochdefinierte Passform. Aufgrund des verwendeten Hightec-Spezialschaumes passt er sich jeder Kopfform ideal an und schützt den Oberkopf durch wohldurchdachte anatomische Anpassbarkeit.

Die Verarbeitung genügt allerhöchsten Qualitätsansprüchen. Der Kopfschutz wird zweifarbig angeboten, freie Farbauswahl.

Ebenso einfaches und geniales Verstellsystem für den Ohriemen. Durchdachtes Höchstmaß an Qualität.

Der Kopfschutz **Starlight Easy** dient dem Schutz vor Kopfverletzungen

bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen, er deckt Fallgefährdungen mit mittlerem Gefährdungspotential ab.

### **Indikationen:**

Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbstständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, sowie bei autoaggressiven Patienten.

Der Kopfschutz **Starlight Easy** verfügt über einen 1,5 cm starken Stirnschutz. Als Zubehör (optional) ist ein Kinnschutz sowie ein gepolsterter Kinnriemen erhältlich.

## ■ Modelle Starlight Easy

5193-3	<b>Starlight Easy</b> Leder türkis/blau
5193-4	<b>Starlight Easy</b> Leder graphitgrau/silber
5193-2	<b>Starlight Easy</b> Leder dunkelblau/hellblau
5193-1	<b>Starlight Easy</b> Leder rot/orange
5193-5	<b>Starlight Easy</b> Leder flieder/violett

## ■ Zubehör für Starlight Easy

EASY-S	Gepolsterter Kinnriemen
EASY-S	Kontrastnaht
5193-01-...	<b>Kinnschutz aus Leder</b> standard
5193-02-...	<b>Kinnschutz aus Leder</b> extra klein
5193-03-...	<b>Kinnschutz aus Leder</b> extra groß



**Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Produkt-Information.**

## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Easy</b>	
Kopfumfang	45 – 62 cm in 1-cm-Intervallen
Farben	nach Wahl
Material	Rindsleder schadstofffrei gegerbt, insbesondere frei an PCP, Azofarbstoffen, Formaldehyd und Chrom VI-Verbindungen
Konstruktion	aus lederüberzogenem 1 cm starkem stoßabsorbierendem PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1,5 cm stark, 4 cm hoch
Verstärkter Stirnschutz	entfällt
Hinterkopfschutz	entfällt
Ohrenschutz	entfällt
Oberseitenkonstruktion	Gitterkonstruktion aus mit Leder überzogenem Stoßabsorbierendem PE-Schaum
Ausführung Oberseite geschlossen	entfällt
Kinnriemen	12 mm breite Lederriemen, mit dem Helm fest verbunden u. mit Dornschießen individuell einstellbar
Nackenriemen	entfällt
Kinnschutz	Optional aus lederüberzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum zum Befestigen an Kinnriemen
Gewicht ohne Zubehör	120 – 260 g

## ■ Verwendungszweck

Die Kopfschutzmodelle **Starlight Protect** und **Starlight Protect Plus** dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen. Sie decken Fallgefährdungen mit **erhöhtem Verletzungspotential** ab.

Andere Verschlusssysteme wie z.B. Fixlock oder Magnetverschluss optional sind gegen Aufpreis zu bestellen.

Indikationen:

Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbstständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, autoaggressiven Patienten

Modelle mit geschlossenem Oberkopf bieten Patienten besonderen Schutz, denen z.B. Teile der Schädeldecke fehlen.

Der Kopfschutz **Starlight Protect** hat einen 1,5 cm starken Stirnschutz, 1,5 cm starken Hinterkopfschutz.

Der Kopfschutz **Starlight Protect Plus** hat einen verstärkten Stirnschutz (4,5 cm) und einen 1,5 cm starken Hinterkopfschutz.

Die Modelle **Starlight Protect** und **Starlight Protect Plus** bieten zusätzlichen Ohrenschutz bei Bedarf.

### Modelle *Starlight Protect*

- 5182-... **Starlight Protect** Modell Standard
- 5189-... **Starlight Protect** Oberseite geschlossen
- 5184-... **Starlight Protect** mit Ohrschutz
- 5191-... **Starlight Protect** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz
- 5192-... **Starlight Protect** mit Ohr- und Wangenschutz
- 5194-... **Starlight Protect** Oberseite geschlossen mit Ohr- und Wangenschutz
- 5284-... **Starlight Protect** mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz
- 5291-... **Starlight Protect** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz

### Modelle *Starlight Protect Plus*

- 5183-... **Starlight Protect Plus** Modell Standard
- 5188-... **Starlight Protect Plus** Oberseite geschlossen
- 5185-... **Starlight Protect Plus** mit Ohrschutz
- 5185VI-... **Starlight Protect Plus** mit Ohrschutz und Visier inkl. speziellen Kinnschutz
- 5190-... **Starlight Protect Plus** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz
- 5190VI-... **Starlight Protect Plus** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz und Visier inkl. speziellen Kinnschutz
- 5195-... **Starlight Protect Plus** mit Ohr- und Wangenschutz
- 5196-... **Starlight Protect Plus** Oberseite geschlossen mit Ohr- und Wangenschutz
- 5285-... **Starlight Protect Plus** mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz
- 5290-... **Starlight Protect Plus** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz

### Zubehör für *Starlight Protect* und *Starlight Protect Plus*

- 5185-1 **Kinnschutz**



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Produkt-Information.

## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Protect und Starlight Protect Plus</b>	
Kopfumfang	48 – 62 cm kleiner/größer auf Anfrage möglich in 1-cm-Intervallen
Farben	Blau, Rot, Grün, Braun, Schwarz + Sonderfarben
Material	Rindsleder schadstofffrei gegerbt, insbesondere frei an PCP, Azofarbstoffen, Formaldehyd und Chrom VI-Verbindungen
Konstruktion	aus lederüberzogenem 1 cm starkem stoßabsorbierendem PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1,5 cm stark, 4 cm hoch (Protect)
Verstärkter Stirnschutz	4,5 cm stark, 4 cm hoch (Protect Plus)
Hinterkopfschutz	1,5 cm stark, 14 cm heruntergezogen
Ohrenschutz	1,5 cm stark, 10 cm heruntergezogen, im Ohrmuschelbereich geringere Wandstärke mit perforiertem Leder
Oberseitenkonstruktion	3 Streben je 4 cm breit, aus mit Leder überzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum (teilweise, ab Kopfumfang 57 cm, mit 4 Streben)
Ausführung Oberseite geschlossen	Geschlossene, lederüberzogene, perforierte Kappe aus stoßabsorbierendem PE-Schaum (um ein gutes Mikroklima zu gewährleisten)
Kinnriemen	18 mm breite Lederriemen, mit dem Helm fest verbunden u. mit Dornschießen individuell einstellbar
Nackenriemen	18 mm Lederriemen mit Clipverschluss und Dornschießen zur individuellen Einstellung
Kinnschutz	Optional aus lederüberzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum zum Befestigen an Kinnriemen
Gewicht ohne Zubehör	<b>Protect</b> 250 – 300 g, <b>Protect Plus</b> 280 – 330 g



## ■ Verwendungszweck

Die Kopfschutzmodelle **Starlight Go Sport** und **Starlight Go Sport Plus** dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten Fallbewegungen oder Bewegungsabläufen. Sie decken Fallgefährdungen mit **erhöhtem Verletzungspotential** ab.

Andere Verschlussysteme wie z.B. Fixlock oder Magnetverschluss optional sind gegen Aufpreis zu bestellen.

Indikationen:

Der Kopfschutz dient zur Sicherheit bei selbstständigen Bewegungen und aktiven Patienten, bei Cerebralparetikern, Epileptikern, anderen Fallgefährdeten, autoaggressiven Patienten

Modelle mit geschlossenem Oberkopf bieten Patienten besonderen Schutz, denen z.B. Teile der Schädeldecke fehlen.

Der Kopfschutz **Starlight Go Sport** hat einen 1,5 cm starken Stirnschutz, 1,5 cm starken Hinterkopfschutz.

Der Kopfschutz **Starlight Go Sport Plus** hat einen verstärkten Stirnschutz (4,5 cm) und einen 1,5 cm starken Hinterkopfschutz.

Die Modelle **Starlight Go Sport** und **Starlight Go Sport Plus Plus** bieten zusätzlichen Ohrenschutz.

### ■ Modelle *Starlight Go Sport*

- 5382-... **Starlight Go Sport** Modell Standard
- 5389-... **Starlight Go Sport** Oberseite geschlossen
- 5384-... **Starlight Go Sport** mit Ohrschutz
- 5391-... **Starlight Go Sport** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz
- 5392-... **Starlight Go Sport** mit Ohr- und Wangenschutz
- 5394-... **Starlight Go Sport** Oberseite geschlossen mit Ohr- und Wangenschutz
- 5484-... **Starlight Go Sport** mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz
- 5491-... **Starlight Go Sport** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz

### ■ Modelle *Starlight Go Sport Plus*

- 5383-... **Starlight Go Sport Plus** Modell Standard
- 5388-... **Starlight Go Sport Plus** Oberseite geschlossen
- 5385-... **Starlight Go Sport Plus** mit Ohrschutz
- 5390-... **Starlight Go Sport Plus** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz
- 5395-... **Starlight Go Sport Plus** mit Ohr- und Wangenschutz
- 5396-... **Starlight Go Sport Plus** Oberseite geschlossen mit Ohr- und Wangenschutz
- 5485-... **Starlight Go Sport Plus** mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz
- 5490-... **Starlight Go Sport Plus** Oberseite geschlossen mit Ohrschutz und Xtra-Gesichtsschutz

### ■ Zubehör für *Starlight Go Sport* und *Starlight Go Sport Plus*

- 5185-1 **Kinnschutz**



Weitere Informationen entnehmen  
Sie bitte unserer aktuellen Produkt-  
Information.

## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Go Sport und Go Sport Plus</b>	
Kopfumfang	48 – 62 cm kleiner/größer auf Anfrage möglich in 1-cm-Intervallen
Farben	Blau, Rot, Grün, Braun, Schwarz + Sonderfarben
Material	Rindsleder schadstofffrei gegerbt, insbesondere frei an PCP, Azofarbstoffen, Formaldehyd und Chrom VI-Verbindungen
Konstruktion	aus lederüberzogenem 1 cm starkem stoßabsorbierendem PE-Schaum
Normaler Stirnschutz	1,5 cm stark, 4 cm hoch (Go Sport)
Verstärkter Stirnschutz	4,5 cm stark, 4 cm hoch (Go Sport Plus)
Hinterkopfschutz	1,5 cm stark, 14 cm heruntergezogen
Ohrenschutz	1,5 cm stark, 10 cm heruntergezogen, im Ohrmuschelbereich geringere Wandstärke mit perforiertem Leder
Oberseitenkonstruktion	Kreuz, (Streben zur Oberkopfmittle schmäler) aus mit Leder überzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum
Ausführung Oberseite geschlossen	geschlossene, lederüberzogene, perforierte Kappe aus stoßabsorbierendem PE-Schaum (um ein gutes Mikroklima zu gewährleisten)
Kinnriemen	18 mm breite Lederriemen, mit dem Helm fest verbunden u. mit Dornschießen individuell einstellbar
Nackenriemen	18 mm Lederriemen mit Clipverschluss und Dornschießen zur individuellen Einstellung
Kinnschutz	Optional aus lederüberzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum zum Befestigen an Kinnriemen
Gewicht ohne Zubehör	<b>Go Sport</b> 250 – 300 g, <b>Go Sport Plus</b> 280 – 330 g

## ■ *Verwendungszweck*

Der Kopfschutz **Starlight Snooze** ist ein besonders leichter Protektor mit sehr guten Verzögerungseigenschaften und hochdefinierter Passform. Für die Verarbeitung werden extra weiches, atmungsaktives Leder und weiche Garne verwendet.

Der verstellbare Kinnriemen bietet guten Halt. Die angenehm weiche Polsterung aus einer Kombination verschiedener Schaumarten verhindert garantiert unangenehmes Drücken während der Schlafphase.

Der Kopfschutz ist ein besonders geeigneter Schutz für Patienten, die unruhig schlafen und auf Grund dessen Gefährdungen ausgesetzt sind.

Andere Verschlussysteme wie z.B. Fixlock-, Klett oder Magnetverschluss optional sind gegen Aufpreis zu bestellen.

## ■ *Modell Starlight Snooze*

**C 5181**      **Starlight Snooze** mit Lederbezug

## ■ *Zubehör für Starlight Snooze*

**5185-1**      **Kinnschutz**



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Produkt-Information.

## Technische Daten

<b>Kopfschutz Starlight Snooze</b>	
Kopfumfang	Fertigung nach Maß
Farben	Beige
Material	Rindsleder schadstofffrei gegerbt, insbesondere frei an PCP, Azofarbstoffen, Formaldehyd und Chrom VI-Verbindungen
Konstruktion	aus lederüberzogenem Hartschaum + Marshmallowschaum + Watte
Normaler Stirnschutz	4 cm stark
Verstärkter Stirnschutz	entfällt
Hinterkopfschutz	4 cm stark
Ohrenschutz	entfällt
Oberseitenkonstruktion	2 extrabreite Kreuzstreifen
Ausführung Oberseite geschlossen	entfällt
Kinnriemen	18 mm breite Lederriemen, mit dem Helm fest verbunden u. mit Leiterschnalle einstellbar
Nackenriemen	entfällt
Kinnschutz	Optional aus lederüberzogenem stoßabsorbierendem PE-Schaum zum Befestigen an Kinnriemen
Gewicht ohne Zubehör	ca. 270 g

### ■ *Reinigung und Pflege von Kopfschutz aus Textil*

Der Kopfschutz von ATO FORM kann mit milder Seife auf einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. In kräftigen Reinigungsmitteln können Substanzen enthalten sein, die zu einer Beschädigung des Kopfschutzes und somit zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung führen können.

Der Kopfschutz ist in der gefüllten Waschmaschine bis 30° waschbar.

Setzen Sie den Kopfschutz keinen hohen Temperaturen aus!

### ■ *Reinigung und Pflege von Kopfschutz aus Leder*

Der Kopfschutz von ATO FORM ist mit Lederreinigungsmittel zu reinigen! Beachten Sie hierbei die angegebenen Anwendungshinweise!

In kräftigen Lösungsmitteln können Substanzen enthalten sein, die zu einer Beschädigung des Kopfschutzes und somit zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung führen können.

Setzen Sie den Kopfschutz keinen hohen Temperaturen aus!

### ■ *Wiedereinsatz*

Ein Wiedereinsatz des Kopfschutzes ist ausgeschlossen.

**In Sachen Umweltschutz:**  
Alle Verpackungsteile sind wieder verwendbar. Die Kartonage soll dem Wertstoff Altpapier zugeordnet werden. Wir verwenden deshalb als Füllstoff auch Papier. Eventuell verwendete Kunststofffolien der Verpackung sind aus PE, können somit schadstoffarm verbrannt oder recycelt werden.



Gesamtprogramm:

- Gehhilfen
- Gehtrainer
- Stehhilfen
- Sitzhilfen
- Hilfsfahrzeuge
- Lifter
- Körperschutz
- Sonderbau

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten.  
Bei Fragen stehen wir Ihnen, wie auch unsere  
Außendienstmitarbeiter oder Ihr Fachhändler, gerne  
zur Verfügung.

Ihr ATO FORM Team

Ihr Fachhändler